


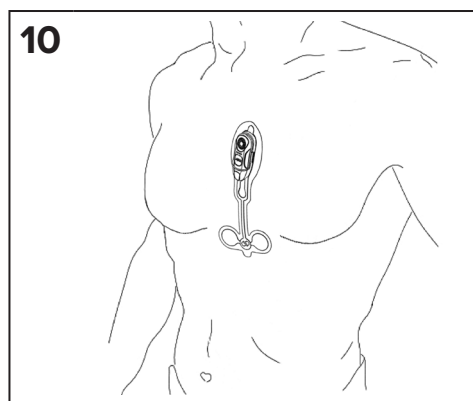
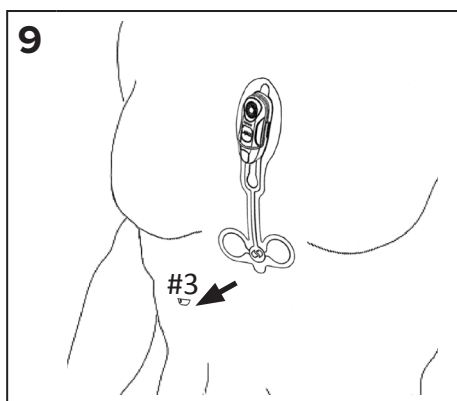
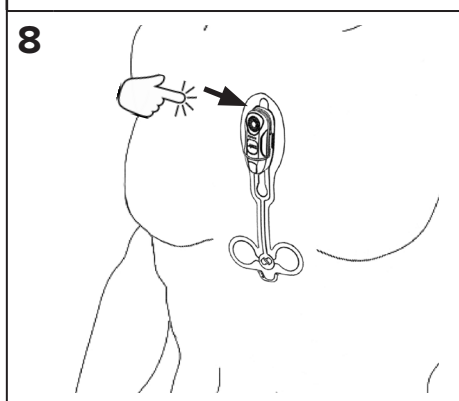
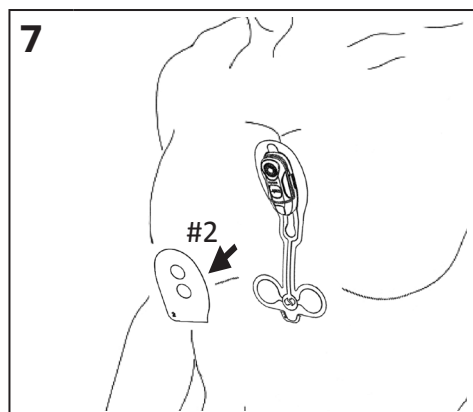
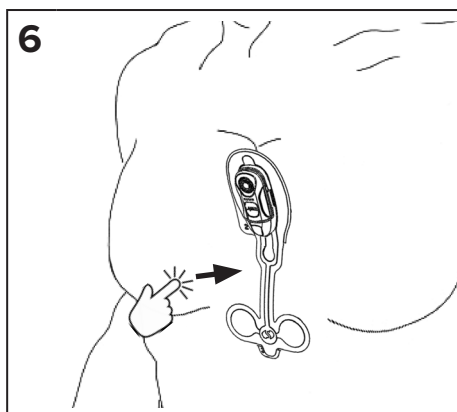
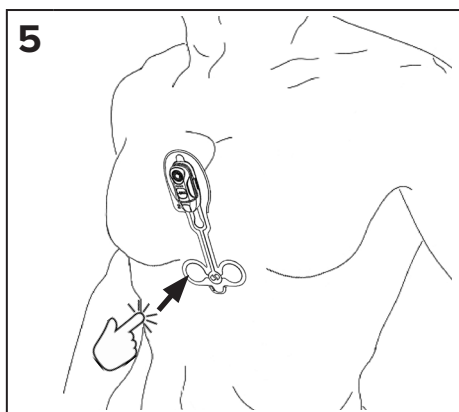
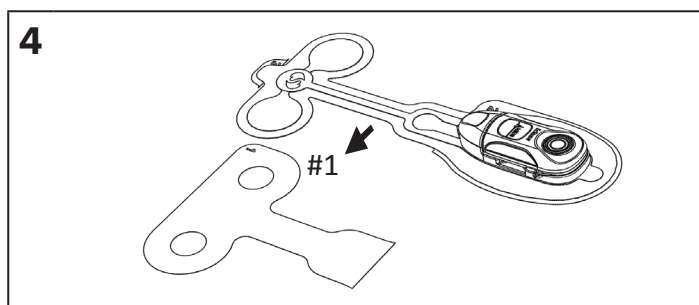
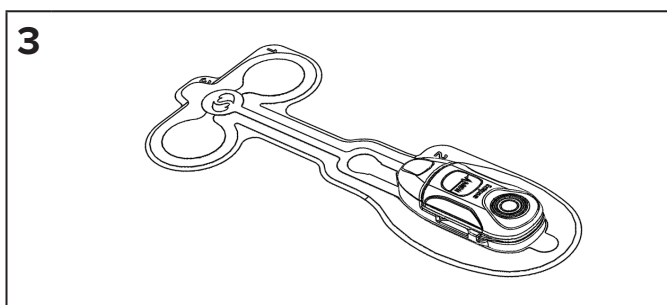
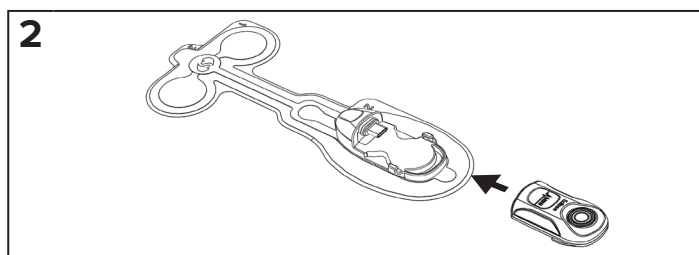
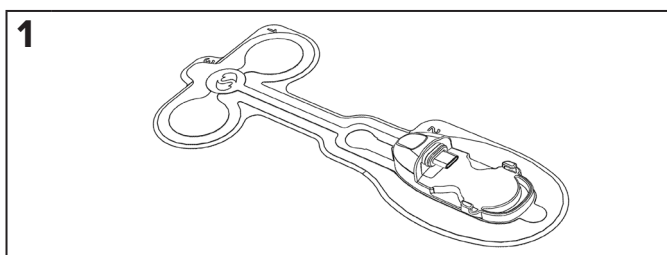
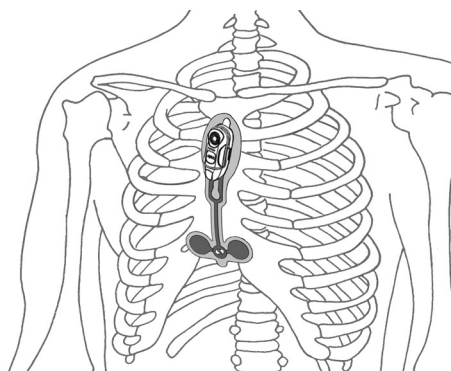
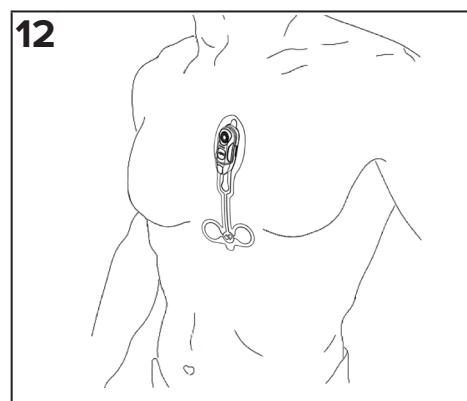
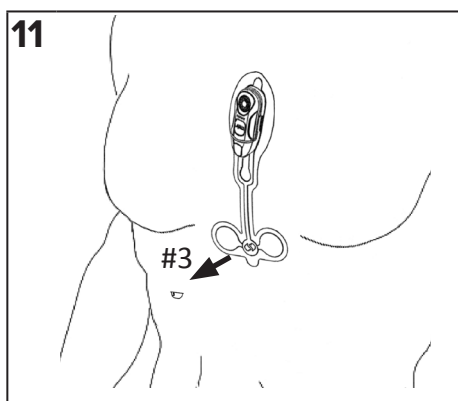
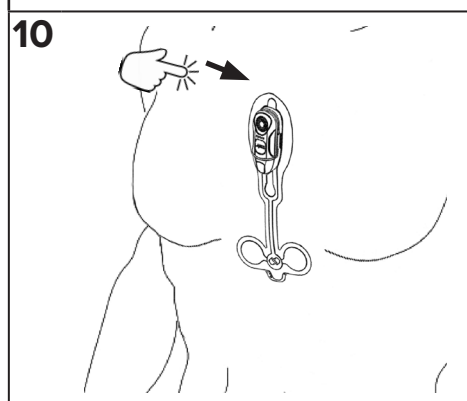
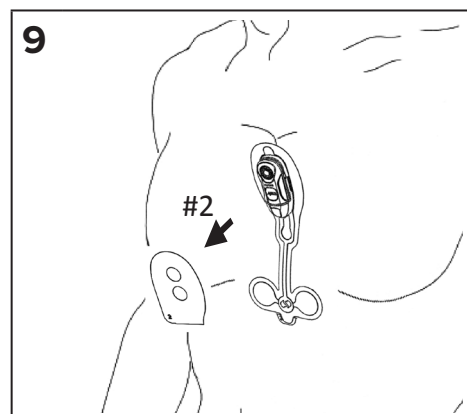
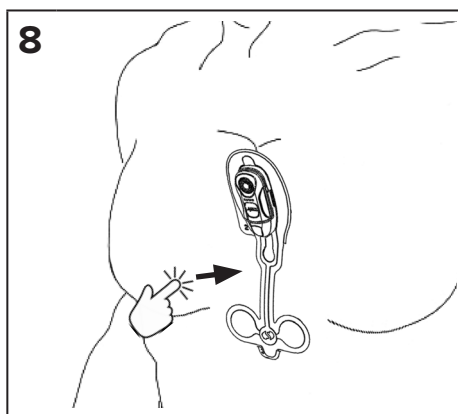
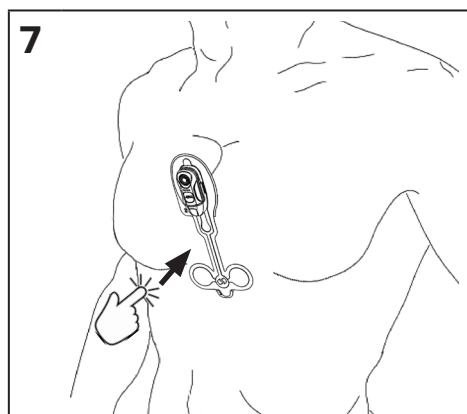
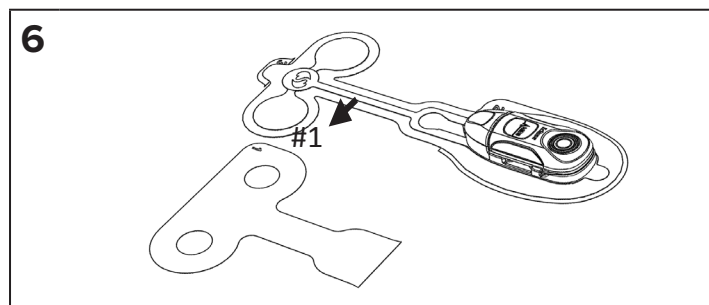
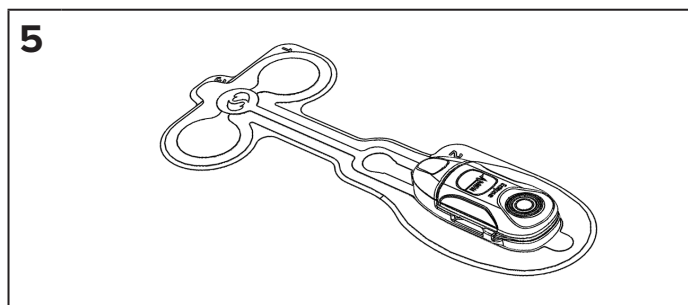


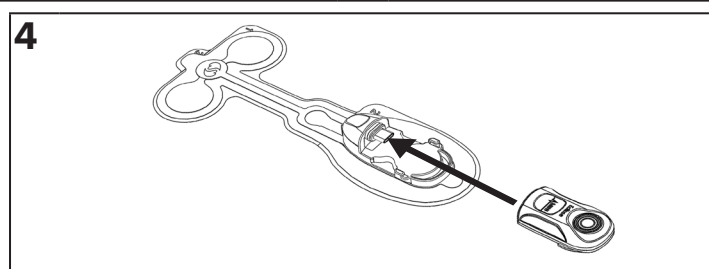

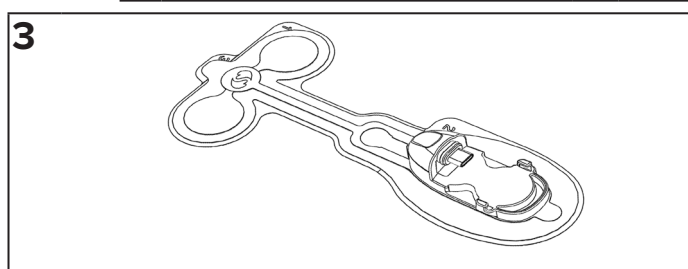

[illegible]

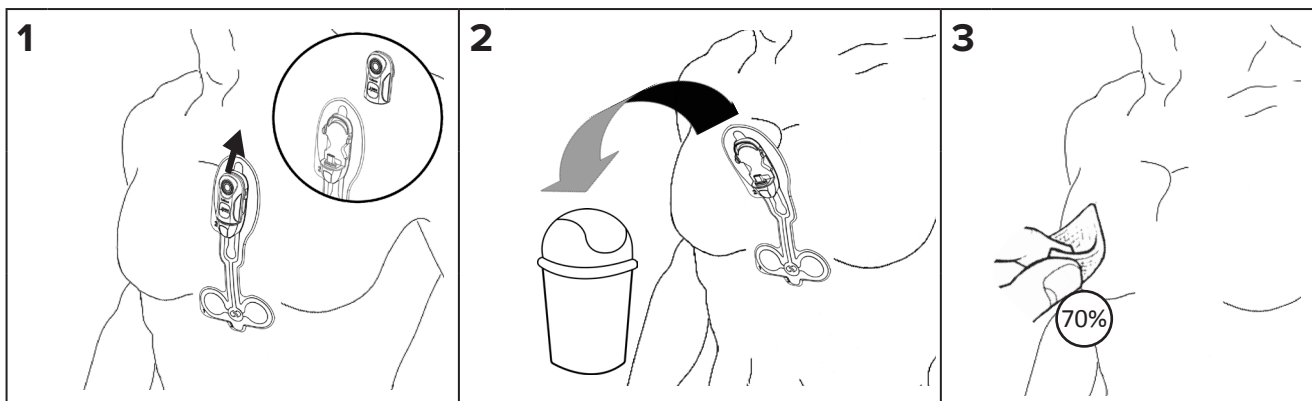

- Niniejszy czujnik EKG Eclipse MINI jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w połączeniu z ambulatoryjnym rejestratorem EKG Eclipse MINI. Eclipse MINI jest przeznaczony do stosowania w warunkach klinicznych lub domowych u pacjentów pediatrycznych lub dorosłych z podejrzeniem arytmii serca.
- W przypadku dłuższego zapisu może być wymagane użycie kilku czujników EKG Eclipse MINI.
- Niniejszy czujnik EKG Eclipse MINI składa się z samoprzylepnej, igłowanej, włókninowej taśmy medycznej, podtrzymującej cztery wielowarstwowe, czujnikowe elektrody hydrożelowe EKG. W celu optymalizacji czułości czujnik EKG Eclipse MINI jest dostępny tylko w jednym rozmiarze (195,5 mm na 90 mm).
- Czujnik EKG Eclipse MINI jest urządzeniem jednorazowego użytku. Zużyty czujnik EKG Eclipse MINI należy traktować jak odpad stwarzający zagrożenie biologiczne. Czujnik EKG Eclipse MINI powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Długotrwałe noszenie czujnika EKG Eclipse MINI może powodować nadmierny świąd lub podrażnienie i zaczerwienienie skóry, ale utrwalenie tych objawów jest mało prawdopodobne. Czujnik EKG Eclipse MINI jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzonymi reakcjami alergicznymi lub nadwrażliwością na kleje lub hydrożele. Czujnik EKG Eclipse MINI może nie być odpowiedni dla pacjentów o wrażliwej lub delikatnej skórze. Użycie odpowiednich chusteczek do usuwania kleju medycznego zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry po usunięciu czujnika EKG Eclipse MINI.
- Czujnika EKG Eclipse MINI ani samego urządzenia Eclipse MINI nie należy nadmiernie moczyć podczas takich czynności jak pływanie czy kąpiel. Prysznic jest dozwolony.
- Użycie defibrylatora w momencie, kiedy czujnik EKG Eclipse MINI jest przyłożony do ciała pacjenta, zmniejsza skuteczność defibrylacji. Przed przystąpieniem do defibrylacji pacjenta czujnik EKG Eclipse MINI należy zdjąć.
- Nie wolno podłączać innych urządzeń ani aparatów do wewnętrznych złączy lub obwodów rejestratora Eclipse MINI, gdy jest on podłączony do pacjenta. Elektrody czujnika EKG Eclipse MINI nie mogą się stykać z innymi elementami przewodzącymi prąd elektryczny, nawet jeśli są one podłączone do uziemienia.
- Czujnik EKG Eclipse MINI nie jest przeznaczony do stosowania w pobliżu sprzętu elektrochirurgicznego wysokiej częstotliwości lub w pobliżu systemu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Czujnik EKG Eclipse MINI należy usunąć przed zabiegiem lub badaniem z użyciem tego typu sprzętu.
- Nie zezwala się na dokonywanie modyfikacji omawianego sprzętu.

W razie pytań lub problemów prosimy się skontaktować ze szpitalem lub opiekunem, korzystając z danych zamieszczonych w dzienniku pacjenta lub uzyskanych w inny sposób.

R_X only



MediMark®Europe
11rueE.Zola
38100Grenoble.
France